

MOBI-ROLL

Reckmann GmbH Mobi-Roll (MR-22)

DE: Gebrauchsanweisung



Die Gebrauchsanleitung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen.
Beachten Sie alle Anweisungen und Hinweise.
Version 2023-09

**WICHTIG:
LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH**

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
2. PRODUKTBESCHREIBUNG	1
3. ZWECKBESTIMMUNG.....	1
4. INDIKATION	1
5. KONTRAINDIKATION	1
6. PFLEGE UND WARTUNG	2
7. WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE	2
8. MONTAGEANLEITUNG	4
SCHRITT 1: MONTIEREN DES MOBI-ROLL GESTELLS.....	4
SCHRITT 2: HINTEREN RAHMEN MONTIEREN	5
SCHRITT 3: MONTIEREN SIE DEN VORDERRADRAHMEN.....	5
SCHRITT 4: MONTIEREN SIE DEN LENKER	6
SCHRITT 5: MONTIEREN SIE DAS KNIEPOLSTER	7
SCHRITT 6: INSTALLIEREN SIE DIE EINKAUFSTASCHE	8
SCHRITT 7: SO STELLEN SIE DIE BREMSEN EIN	8
9. ANWENDUNGSHINWEISE.....	9
10. LEBENS- UND NUTZUNGSDAUER	9
11. KOMBINATION MIT ANDEREN PRODUKTEN.....	9
12. ENTSORGUNG	9
13. TECHNISCHE DATEN/ MATERIALIEN	9

1. EINLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Bevor Sie den Mobi-Roll verwenden, sollten Sie von Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten in die korrekte Anwendung des Mobi-Rolls, einschließlich der Anpassung an die entsprechende Höhe, geschult werden.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell konzipierte Räder/Reifen ermöglichen durch die Federung ein vollumfängliches Mobilitätserlebnis, ohne die Gefahr eines Luftverlustes im einer der Luftreifen. Die Hinterrad-Federung minimiert Erschütterungen wirksam und schont die verletzte Extremität. Die Bremsen haben eine Feststellfunktion, welche von beiden Handbremshebel ausgeführt werden kann. Beide Bremshebel wirken auf beide Hinterräder. Die Feststellfunktion bietet einen stabilen Stand. Stabile Griffe ermöglichen einen guten Halt, auch bei nassem Wetter. Die Lenkung sorgt nicht nur für eine verbesserte Stabilität, sondern erfüllt mit einem Wenderadius von nur 1,40 m alle Notwendigkeiten für einen leichten Umgang im Haus. Die wetterfeste, schließbare und abnehmbare Einkaufstasche unterstützt beim Transportieren jeder Art im Innen- als auch Außenbereich.

Lenkstangen- und Sattelhöhe lassen sich ohne Werkzeug vielfach leicht einstellen. Die Kniestütze bietet eine komfortable Ablage Ihres geschädigten Beines mit einer extra ausgeformten Vertiefung für das Knie. Eine Klingel verschafft zusätzlichen Schutz bei der Fortbewegung. Neben der kompakten Klappfunktion und dem einfachen Verstauen des Mobi-Roll z.B. in den Kofferraum eines Autos, sorgt das geringe Gewicht von 11 kg für ein leichtes Handling.

3. ZWECKBESTIMMUNG

Der Mobi-Roll ist konzipiert für den Ausgleich von chronischen oder temporären Funktionseinschränkungen am Fuß, Sprunggelenk und/oder distalem Unterschenkel nach Traumata oder Operationen. Er erleichtert die Fortbewegung bei Personen mit Gleichgewichtsproblemen oder Schwächen während des Stehens.

4. INDIKATION

Der Mobi-Roll ist geeignet für Menschen mit Gleichgewichtsproblemen, Schwächen im Stehen und Menschen die eine feste, unbewegliche Unterstützung benötigen, um sie beim Gehen zu unterstützen.

5. KONTRAINDIKATION

Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine der folgenden Kontraindikationen zutrifft:

- Bei Vorliegen einer Sehbehinderung
- Bei schwerwiegenden Gleichgewichtsproblemen
- Bei Behinderungen oder Verletzungen beider Beine

6. PFLEGE UND WARTUNG

- Mit feuchtem Tuch und nicht abrasivem Reinigungsmittel reinigen.
- Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Mit einem sauberen Lappen abtrocknen.
- Stellen Sie sicher, dass alle angebrachten Hardware- und Sitzhebel jederzeit sicher sind.
- Überprüfen Sie den Mobi-Roll regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Bremsen, der Sitzhebel, die Lenkung und die Räder ordnungsgemäß funktionieren und alle Teile sicher sind.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Artikel sofort.
- Wenn der Handgriff locker ist, **NICHT VERWENDEN**. Ersetzen Sie diesen oder kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.
- Stellen Sie sicher, dass die Bremsen korrekt funktionieren. Im Laufe der Zeit können sich die Bremszüge dehnen. Sie können von einem qualifizierten Händler angepasst werden. Wenn Sie dies nicht tun, kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen und sogar zu Verletzungen des Anwenders kommen.

7. WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE

- Geeignet für Patienten ab 7 Jahre.
- Prüfen Sie vor der ersten Anwendung und vor jeder Fahrt die Funktion und ordnungsgemäße Befestigung aller Teile. Prüfen Sie, ob die Bremse bremst und die Räder leicht und ruhig laufen.
- Die erste Probefahrt sollte auf einer großflächigen, glatten Fahrbahn erfolgen, auf der ungestört geübt werden kann.
- Das Fahren auf zu starkem Gefälle kann zu unerwünscht hohen Geschwindigkeiten führen, wodurch Stürze durch abrupte und unkontrollierte Manöver begünstigt werden.
- Kleinere Stufen, abgesenkte Bordsteine oder Spurrillen sollten nie parallel oder im rechten Winkel angefahren werden. Es besteht die Gefahr, dass die Vorderräder abrupt blockieren und einen Sturz provozieren können. Es wird empfohlen, die genannten Unebenheiten in einem 45°-Winkel anzufahren.
- Zusammenstöße aller Art sind zu vermeiden.
- Das Tragen eines langen Strumpfes/ Hose wird empfohlen, da es in seltenen Fällen bei direktem Hautkontakt im Bereich des Kniepolsters zu starkem Schwitzen und Hautirritationen kommen kann.
- Das maximal zulässige Ladegewicht (Fahrergewicht + Zuladung) von **< 136 kg** darf nicht überschritten werden, ebenso wie das Maximalgewicht (5 kg) der Zuladung in der Einkaufstasche. Das Beladen von spitzen Gegenständen ist untersagt.
- Im Straßenverkehr ist die Straßenverkehrsordnung (StVO) zu beachten. Neben den Reflektoren am Mobi-Roll wird zudem das Tragen reflektierender Kleidung empfohlen.
- Die Mobilitätsgeschwindigkeit sollte immer dem momentanen Verletzungszustand angepasst sein, um den/die bestmöglichen Schutz/ Regeneration zu ermöglichen.
- Der Mobi-Roll ist vor dem Gebrauch an die Körpergröße des Anwenders anzupassen. Zudem sollte beim Tragen einer Schiene darauf geachtet werden, dass diese samt Fuß nicht mit den hinteren

Reifen/Rädern in Berührung kommen.

- Beim Abstellen des Mobi-Roll ist die Feststellbremse zu arretieren.
- Bei Trage- oder Hebevorgängen ist die Hilfe von Dritten zu empfehlen.
- Bei Problemen oder Fragen zur Nutzung des Mobi-Roll wenden Sie sich umgehend an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihrer medizinischen Behandlung und Therapie, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt.
- Nebenwirkungen oder Vorfälle mit dem Produkt sind dem Hersteller sowie der Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.
- Hängen Sie zu keiner Zeit etwas an den Griffen oder dem Rahmen des Mobi-Rolls auf. Dies kann dazu führen, dass der Mobi-Roll kippt, was zu Körperverletzungen oder Schäden am Mobi-Roll führt. Kleinere Gegenstände können im Mobi-Roll Korb transportiert werden.
- Versuchen Sie **NICHT**, Objekte zu erreichen, während Sie den Mobi-Roll verwenden. Das Greifen nach diesen Objekten führt zu einer Veränderung der Gewichtsverteilung und somit zu einer Kippgefahr.
- Gehen/ Fahren Sie **NICHT** rückwärts, während Sie den Mobi-Roll benutzen.
- Alle Räder müssen während des Gebrauchs jederzeit in Kontakt mit dem Boden sein. Dies stellt sicher, dass der Mobi-Roll richtig ausbalanciert ist.
- Halten Sie bei der Anwendung des Mobi-Rolls immer beide Hände an den Griffen.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Verkäufer autorisiert wurden.
- Wenn Sie den Mobi-Roll drehen, seien Sie vorsichtig und drehen Sie sich nur, während Sie sich langsam bewegen.
- Der Mobi-Roll ist nur für den individuellen Gebrauch bestimmt. Versuchen Sie **NICHT**, den Mobi-Roll zu schieben, während jemand auf dem Sitz sitzt. Dies kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Mobi-Roll führen.

8. MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

1. Einkaufstasche
2. Vorderer Lenker mit Klingel (nicht abgebildet)
3. Knieschützer
4. Hauptrahmen
5. Vorderradrahmen

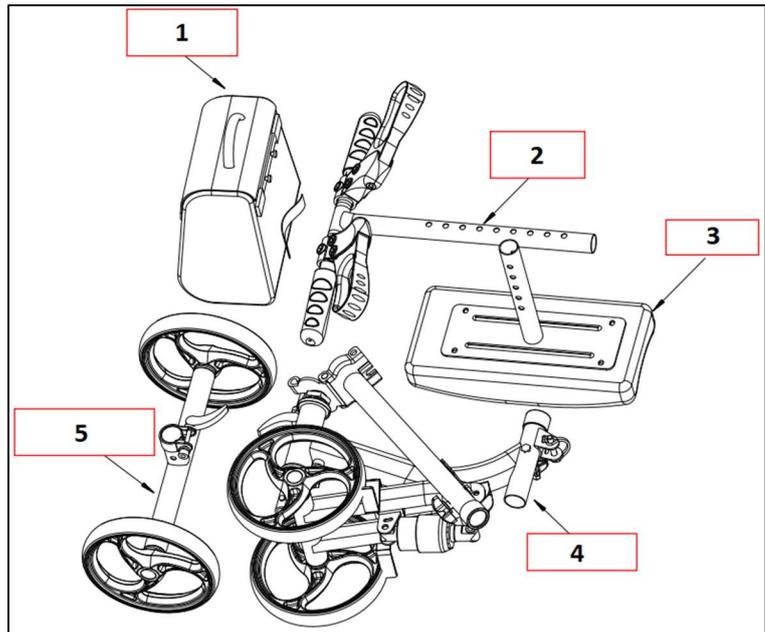


Abbildung 1: Lieferumfang

SCHRITT 1: MONTIEREN DES MOBI-ROLL GESTELLS

Packen Sie den Mobi-Roll aus dem Karton aus. Drehen Sie das Außenrohr des Hauptrahmens auf die vertikale Position [1]. Danach sperren Sie die Schnellwechsellaste [2].

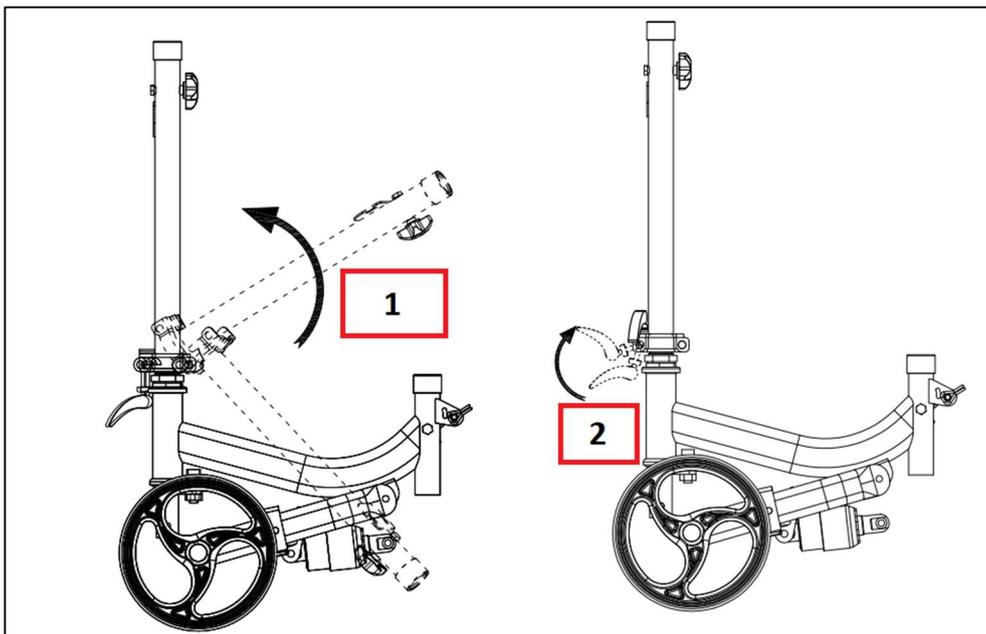


Abbildung 2: Schritt 1

SCHRITT 2: HINTEREN RAHMEN MONTIEREN

Zuerst die hintere Radträgerstange öffnen [1], dann das Montageloch des Stoßdämpfers mit dem Rahmenanschluss ausrichte und den Verriegelungsstift einsetzen [2].

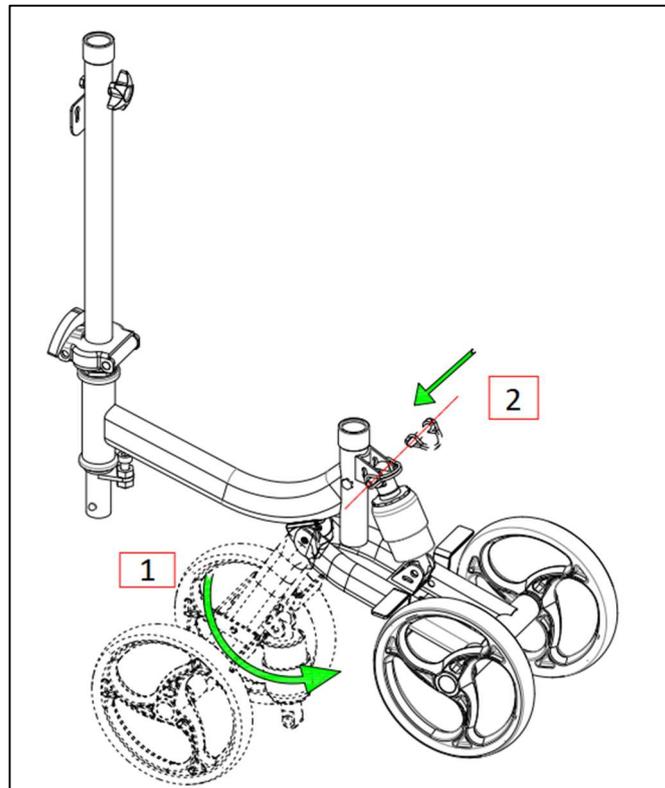


Abbildung 3: Schritt 2

SCHRITT 3: MONTIEREN SIE DEN VORDERRADRAHMEN

Halten Sie zuerst den Federknopf gedrückt [1] und legen Sie das Vorderrad auf den Vorderradrahmen, setzen Sie den Rahmen in die gezeigte Richtung ein [2]. Drehen Sie dann das äußere Rohr des Rahmenhandlaufs, um den Federknopf in das Federknopfloch zu arretieren [3] und verriegeln Sie den Schnellverschlussknopf [4].

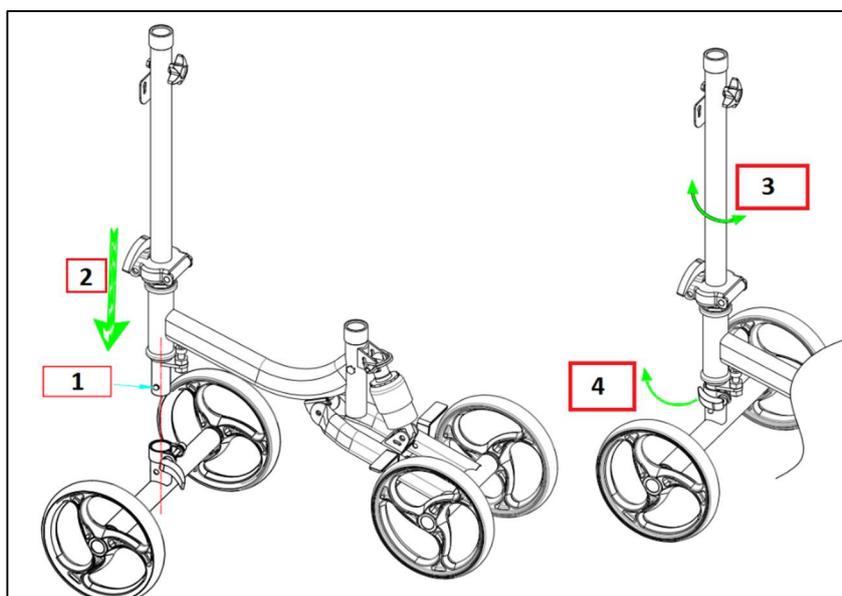


Abbildung 4: Schritt 3

SCHRITT 4: MONTIEREN SIE DEN LENKER

Stecken Sie den Lenker in den Rahmen [1] und setzen das Handlaufrahmenloch ein [2] indem die Schraube durch das Sechskantende eingefädelt und anschließend der Knopf verriegelt wird.

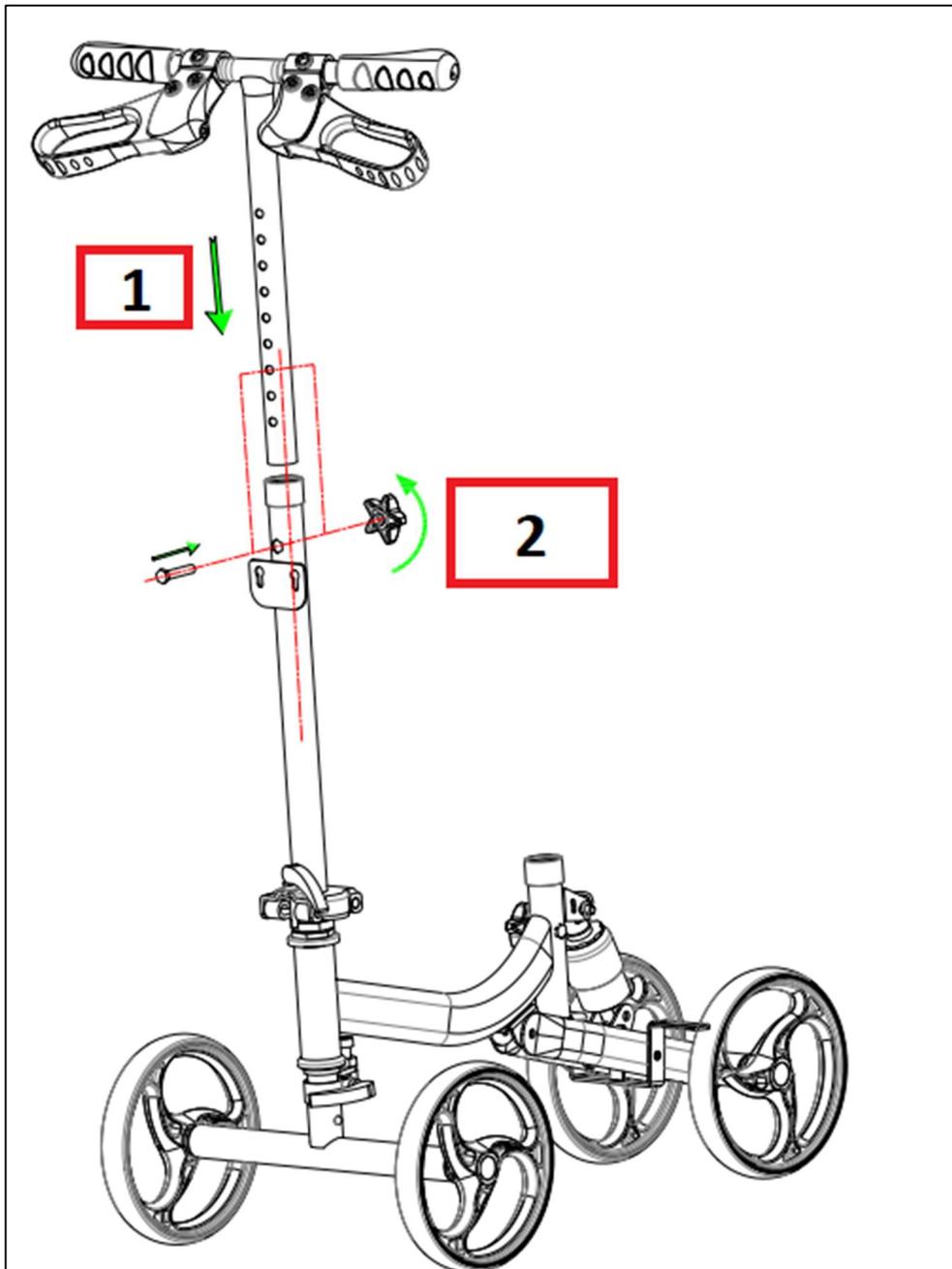


Abbildung 5: Schritt 4

SCHRITT 5: MONTIEREN SIE DAS KNIEPOLSTER

Setzen Sie das Kniepolster in den Rahmen ein [1] und befestigen es mit dem Verriegelungsknopf [2].

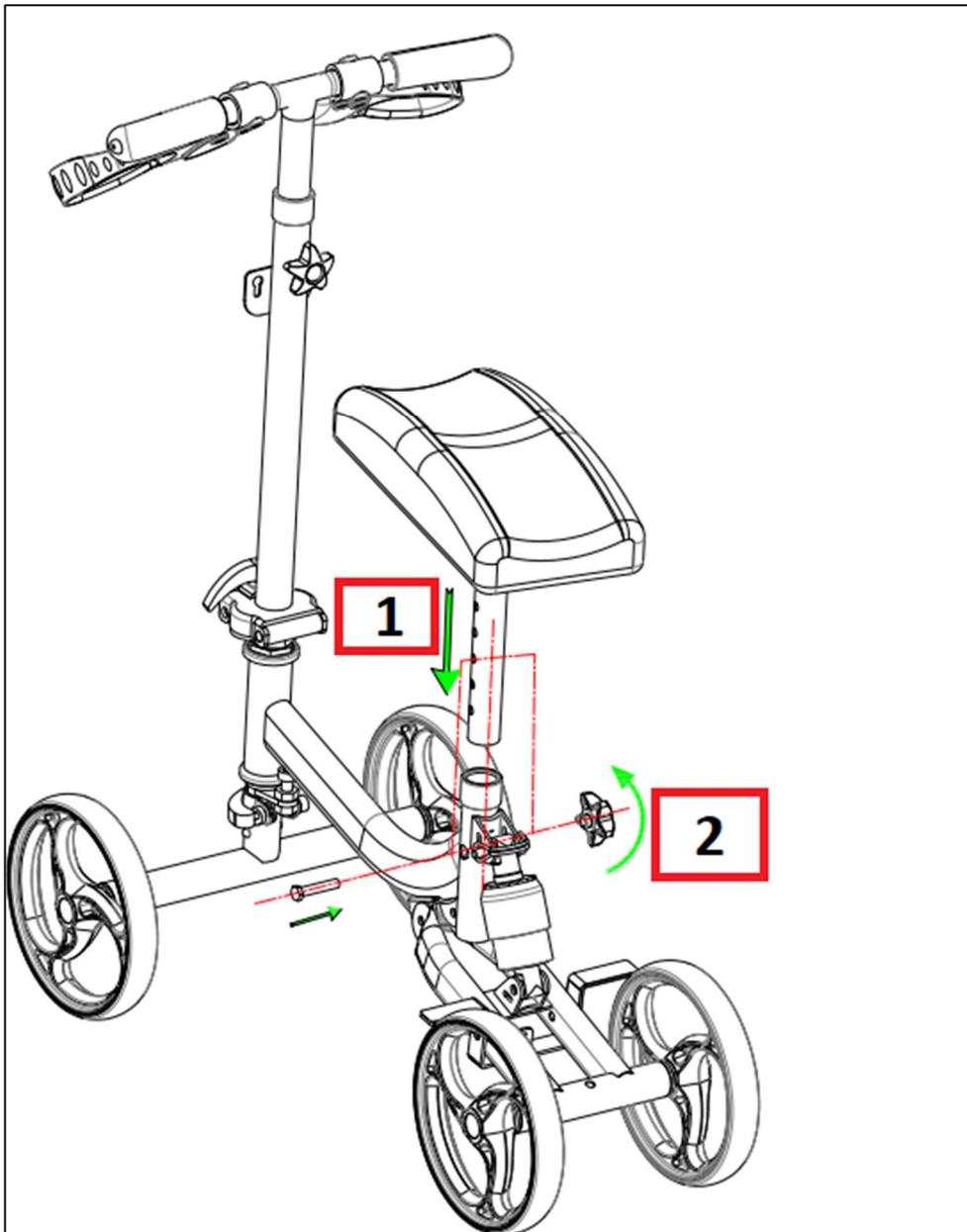


Abbildung 6: Schritt 5

SCHRITT 6: INSTALLIEREN SIE DIE EINKAUFSTASCHE

Legen Sie die beiden Nägel der Tasche gleichzeitig durch das Montageloch des Anbauteils des Rahmens und drücken die Einkaufstasche nach unten, bis diese eingerastet ist.



Abbildung 7: Schritt 6

SCHRITT 7: SO STELLEN SIE DIE BREMSEN EIN

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um den Handhebel zu lösen, neu zu positionieren und in die gewünschte Position zu ziehen.

Die Bremsspannung kann mit den Muttern an beiden Enden des Bremskabels eingestellt werden. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen, gegen den Uhrzeigersinn zum Lösen der Spannung.

9. ANWENDUNGSHINWEISE

Um den Mobi-Roll zu bedienen, legen Sie Ihre Hände auf den Lenker.

Legen Sie das Knie Ihres verletzten Beines bequem auf die Mitte des Knieschützers.

Lassen Sie die Bremse los, um sich langsam vorwärts oder rückwärts zu bewegen, machen Sie kleine Schritte mit Ihrem gesunden Bein und halten Sie Ihr verletztes Bein zentriert auf dem Knieschützer.

Wenn Sie den Lenker nach links oder rechts bewegen, wird die Lenkungsfräse mit minimalem Kraftaufwand gedreht. Drehungen sollte nur mit langsamer Bewegungsgeschwindigkeit ausgeführt werden.

10. LEBENS- UND NUTZUNGSDAUER

Der Mobi-Roll ist für den Wiedereinsatz bei weiteren Versicherten geeignet und vorgesehen.

Nach jeder Weitergabe, jedoch spätestens nach einem Jahr entsprechend der gültigen Qualitätsmanagement-Richtlinie durch den Hersteller oder qualifiziertes Fachpersonal zu warten und auf dessen Gebrauchstauglichkeit zu prüfen. Dieser bestätigt die Gebrauchstauglichkeit und Funktionstauglichkeit für je einen Anwendungsintervall max. jedoch für die einjährige Verwendungsdauer. Eine genaue Lebens- oder Nutzungsdauer ist nicht definiert. Diese hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Materialverschleiß nach Nutzung, der Lagerung des Mobi-Rolls als auch vom Zustand des Patienten.

11. KOMBINATION MIT ANDEREN PRODUKTEN

Eine Kombination mit anderen Hilfsmitteln ist nicht vorgesehen.

12. ENTSORGUNG

Das Produkt ist gemäß den national geltenden Vorschriften zu entsorgen.

13. TECHNISCHE DATEN/ MATERIALIEN

Technische Daten

Gewicht:	11 kg	Länge:	80 cm
Vorder-/ Hinterrad:	8 Zoll	Wenderadius:	140 cm
Höhe:	80 – 103 cm	Sattelhöhe:	42 – 51 cm
Breite:	41,5 cm	Auflagefläche Knienpolster:	35 x 17 cm
Zuladung Einkaufstasche max.:	5 kg		
Maximale Belastbarkeit:	< 136 kg (Fahrergewicht + Zuladung in Einkaufstasche)		
Kartonage:	72 x 43 x 32 cm		

Materialien

Das Gesamtprodukt ist aus korrosionsgeschützten Materialien gefertigt. Die Hauptkomponenten sind aus nachfolgenden Materialien:

Rahmen:	Aluminium	Einkaufstasche:	Polyester
Reifen:	PU-Schaum	Felgen:	PA 6
Knienpolster:	PU-Schaum		



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse I.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.



Hersteller: Reckmann GmbH
Bernsweg 32, D-47445 Moers Germany
info@mobi-roll.de
www.mobi-roll.de
T. +49 151 40117913